

Anleitung R Test / Event-EKG

LED

Blinkt grün während der
Aufzeichnung

Speicherzustand:

LED rot: Ereignis gespeichert

LED grün: Speicher leer



Manueller Marker

Dieses Set enthält:

- Aufnahmegerät: Der Recorder ist bereits mit dem Namen des Patienten programmiert, hat neue Batterien und ist bereit für die Aufzeichnung. Das Elektrokabel ist mit dem Gerät verbunden.
- 16 vorgelierte hypoallergene Ag-AgCl-Elektroden (für das korrekte Anlegen des Gerätes brauchen Sie 2 Elektroden, die Restlichen bitte dem Patienten als Reserve mitgeben.)
- Patientenmerkblatt mit Schema für das Anlegen der Elektroden
- Rasierklinge, Alkoholpads
- Dokument „Patientenformular Event-EKG“ durch den Arzt auszufüllen
- Dokument „Symptom-Tagebuch“ durch den Patienten / die Patientin auszufüllen.

Anlegen der Elektroden

- Bei Bedarf Hautstellen, an denen Elektroden angebracht werden, rasieren.
- Hautstellen mit Alkoholpads reinigen und anschliessend kurz trocknen lassen.
- Anlegen der vorgelierten Elektroden und Anschliessen an den Recorder: Linke obere Brustseite (ca. V2) links seitl. unten (ca. V5). Zwischen den Elektroden besteht so ein Abstand von ca. 20 cm.

- Den Recorder durch Drücken der Bedienungstaste (mittlere Taste) einschalten es ertönt ein durch das EKG moduliertes Signal
- Nach ca. 20 Sekunden wird das Signal rhythmisch und die Aufzeichnung startet. Mittlere Taste noch einmal drücken, um die Signaltöne abzuschalten.
- Während der Aufzeichnung blinkt die LED alle 5 Sekunden grün auf

Aufzeichnung von Events

- Um ein Ereignis zu speichern, muss die Bedienungstaste (mittlere Taste) gedrückt werden. Der Recorder speichert die vorangegangenen 20 und nachträglichen 10 Sekunden.
- Neben den durch den Patienten manuell gesetzten Events werden auch signifikante Arrhythmien, welche vom Patienten vielleicht nicht bemerkt werden, gespeichert.

Nach dem Recording

- Der Patient / die Patientin bringt den Recorder und das ausgefüllte Patiententagebuch in die Arztpraxis zurück.
- Der Recorder und die ausgefüllten Dokumente „Anmeldung R Test / Event-EKG“ und „Symptomtagebuch“ werden dem MCL Kurier mitgegeben.

Instruktion der Patienten

Zum Duschen, Saunieren etc. muss er Recorder entfernt werden. Patienten müssen deshalb gut instruiert werden, damit sie während der 7 Tage Tragezeit den Recorder eigenständig und korrekt anlegen können. Hierzu dient das mitgelieferte Patientenmerkblatt mit Anlegeschema.