

Anleitung 24h Holter EKG



Anschluss
Elektrodenkabel

Bedienungstaste

Dieses Set enthält:

- Aufnahmegerät: Der Recorder ist bereits mit dem Namen und Geburtsdatum des Patienten programmiert, hat neue Batterien und ist bereit für die Aufzeichnung.
- Elektrodenkabel
- 10 Elektrodenkleber (für das korrekte Anlegen des Gerätes brauchen Sie 5 Elektroden, 5 weitere werden als Reserve mitgeliefert)
- Schema für das Anlegen der Elektroden
- Rasierklinge
- Alkoholpads
- Tragetasche, -riemen und -gurt
- Dokument „Patientenformular 24h Holter EKG“ durch den Arzt auszufüllen
- Dokument „Symptom-Tagebuch“ durch den Patienten / die Patientin auszufüllen

Anlegen der Elektroden

- Bei Bedarf Hautstellen, an denen Elektroden angebracht werden (gemäss mitgeliefertem Anlegeschema) rasieren.
- Hautstellen mit Alkoholpads reinigen und anschliessend kurz trocknen lassen.
- Elektrodenkleber auf die gereinigte Haut kleben. Die Druckknöpfe für die Elektroden werden in Richtung Herz gerichtet.
- Das Elektrodenkabel an den Recorder anschliessen und diese etwa in der Mitte mit Klebestreifen oder Pflaster auf der Haut des Patienten fixieren um Messartefakte durch Bewegung und Umknicken der Kabel zu minimieren.
- Den Recorder durch Drücken der Bedienungstaste einschalten. Auf dem Display erscheinen das Anlegeschema sowie der Name der Patientin.
- Das Elektrodenkabel gemäss mitgeliefertem Anlegeschema und Farben der Druckknöpfe an die Elektroden schliessen.
- Das Gerät startet automatisch nach 8 min und schaltet sich nach 24 Stunden automatisch ab.

Nach dem Recording

- Der Patient / die Patientin bringt den Recorder und das ausgefüllte Patiententagebuch in die Arztpraxis zurück.
- Der Recorder und die ausgefüllten Dokumente „Patientenformular 24h Holter EKG“ und „Symptomtagebuch“ werden dem MCL Kurier mitgegeben. Allenfalls für die Krankengeschichte eine Kopie der Dokumente erstellen.

Zu Beachten

- Wird während der Aufzeichnung die Bedienungstaste einmal gedrückt, wird ein sogenannter Marker gesetzt. Der Patient kann einen Marker setzen um auftretende Beschwerden zu vermerken.
- Das Gerät kann ausgeschaltet werden durch längeres Drücken der Bedienungstaste und anschliessender Bestätigung auf dem Touchscreen-Display.
- Während der Aufzeichnung ist das Display dunkel, dass der Recorder läuft wird nur durch ein grünes Blinken in der Mitte der Bedienungstaste angezeigt.