

## ApneaLink™



### Dieses Set enthält:

- Ein ApneaLink Recorder mit frischen Batterien und gespeicherten Patientendaten (Name, Vorname und Geburtsdatum). Bereits angeschlossen an das Gerät sind:
  - Kabel und Wiederverwendbarer Fingersensor für die Oximetermessung
  - Nasenbrille
  - Tragegurt
- Anleitung für den Patienten
- Patientenformular ApneaLink

## Vorgehen

### Vorbereitung

- Das Apnoe-Gerät ist so vorbereitet, dass der Patient das Gerät nur noch gemäss Anleitung anlegen und einschalten muss.
- Ausfüllen des Patientenformulars: Füllen Sie den ersten Teil des Formulars in jedem Fall aus. Der untere Teil muss nur ausgefüllt werden, wenn Sie eine zusätzliche Beurteilung durch Frau Dr. med. Iris Schmid des Quartier Bleu, Praxis für Pneumologie wünschen.
- Geben Sie dem Patienten den Koffer mit dem Apnoegerät und der Anleitung mit nach Hause.

### Kontrolle der Aufzeichnung

- Bringt der Patient den Recorder zurück, können Sie mit der Untersuchungsanzeige prüfen, ob die Aufzeichnung während mindestens 4 Stunden erfolgreich war. Drücken Sie dazu auf die Ein-/ Austaste, bis die Leuchtanzeige angeht (grün = erfolgreiche Aufzeichnung, rot = fehlerhafte Aufzeichnung).
- Drücken Sie die Taste dann noch einmal kurz, damit der Recorder nicht wieder gestartet wird.
- Falls die Aufzeichnung fehlerhaft war, können Sie dem Patienten den Recorder eine weitere Nacht mitgeben.

### Rückgabe

- Rückgabe des Recorders zusammen mit dem ausgefüllten Patientenformular an MCL per Kurier.