

Kurzanleitung 24h-Blutdruck / Schiller BR-102

Inhalt des Sets

Das 24h-BD Set enthält folgendes:

- Schiller 24h-Blutdruck-Messgerät BR-102 plus inkl. 2 AA-Akkubatterien.
- 1 Manschette (Medium oder Large je nach Bestellung)
- 1 Kunstleder-Schutzhülle für BR-102 plus
- 1 Einweg-Tragetasche für BR-102 plus

Inbetriebnahme und Beginn der Aufnahme

- 1.) Manschette an das Gerät anschliessen und dem Patienten anlegen. Beachten Sie dabei, dass das Mikrofon auf der Arterie des Patienten liegt (siehe Abbildung).



- 2.) Schalten Sie anschliessend das Gerät mit der grünen Taste ein.
- 3.) Mit **WEITER** (grüne Taste) **START AUFNAHME** wählen und mit **OK** (blaue Taste) bestätigen.
- 4.) Mit **WEITER** (grüne Taste) **START** wählen.
- 5.) Sie werden gefragt: „Wollen Sie eine BD-Aufnahme starten?“ → mit **OK** (blaue Taste) bestätigen.

- 6.) Nach einigen Sekunden erscheint folgende Anzeige auf dem Display:
- Uhrzeit (z.B.): 10.15vvvb
 - BD-Messung
 - Erste Messung folgt gleich → warten bis Manschette sich aufpumpt und Messung erfolgt!
 - BD-Aufnahme
 - Nächste Messung (z.B.): 10.45

Erscheint auf dem Display die Meldung „**nächste Messung**“, bedeutet dies, dass das 24h-BD Gerät programmiert ist. Nun können Sie das Gerät in die Schutzhülle legen und am Patienten befestigen.

Messintervall

Falls von Ihnen nicht anders gewünscht, sind die Messintervalle wie folgt festgelegt:

Am **Tag** (07:00-22:00) → alle **30 Minuten**

In der **Nacht** (22:00-07:00) → alle **60 Minuten**

Zur Information

- Das **Gerät stellt** nach einer Messung von **24 Stunden automatisch ab**. Das Feld im Display zeigt dann nichts mehr an = **leeres, graues Feld!**
- Wenn der Patient zur Abnahme des 24h-BD Gerätes in die Praxis kommt, warten Sie bitte bis das Gerät abgestellt hat. **Wird das Gerät vor Ablauf der 24 Stunden abgenommen, können Daten verloren gehen!**

Rückgabe

Nach Ende der 24h-BD-Messung den Druckschlauch entfernen. Die **Manschette** wieder in den **Kofferdeckel zurücklegen**. Achten Sie darauf, dass der **Druckschlauch niemals geknickt** wird.

Besten Dank

Ihre MCL Medizinische Laboratorien AG